



Nihon Carving Co.,Ltd.



哺乳瓶と乳首を  
同時に殺菌

# Clear Baby Bottle

哺乳瓶殺菌乾燥保管庫

CBB-385


薬品を使わずに、哺乳瓶は192~384本、乳首は192~384個の殺菌と保管を同時に行える大型装置です。

クリアベビーボトルは、新設の乳児センター、病院の新生児用調乳施設などで、  
感染症・食中毒の予防などに活用されています。

安心・安全設計

殺菌完了後は  
その保存状態を24時間以上保持

●  
保管中はドアの開閉後、  
紫外線殺菌灯 (UV) が4分間点灯、  
庫内への新たな浮遊菌や  
落下菌を殺滅

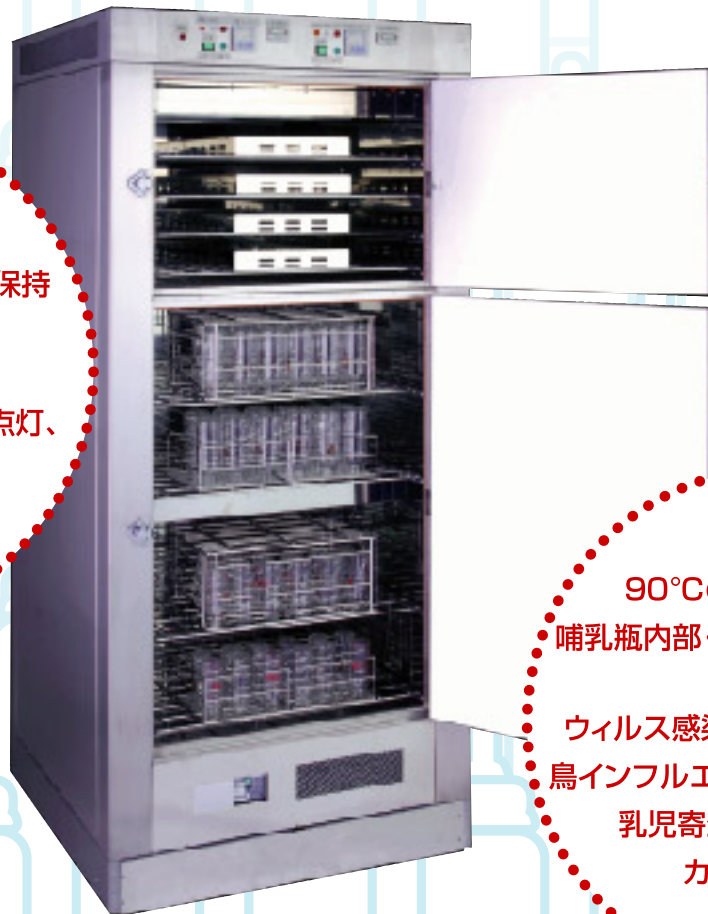

確実殺菌

90℃の遠赤外線熱風が  
哺乳瓶内部・乳首の吸引穴まで殺菌


●  
ウィルス感染 (ノロ・ロタウィルス、  
鳥インフルエンザ、他)、カンジタ菌、  
乳児寄生菌、芽胞形成菌、  
カビなどを殺滅

食中毒・感染症予防製品を製造、販売する  
日本カービング株式会社

クリアベビーボトルのさまざまな機能が、  
感染症・食中毒を予防します。

**Clear Baby Bottle**

哺乳瓶殺菌乾燥保管庫 CBB-385

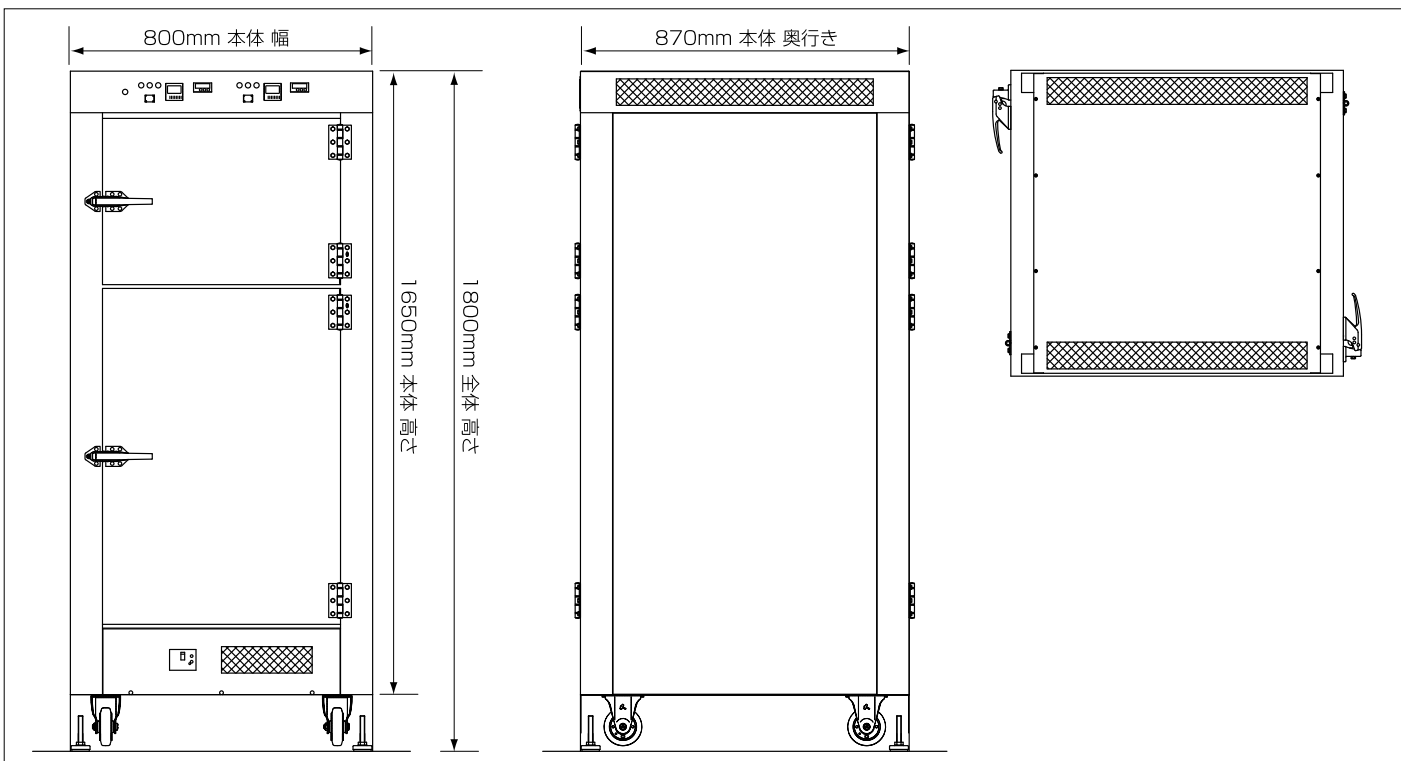

## 仕様

型式	CBB-385
外形寸法	W800×D870×H1800(mm)
庫内寸法	W600×D810×H1270(mm)
カゴ収納数	哺乳瓶専用コンテナ16個=384本 乳首専用コンテナ8個=384個
消毒方法	乾熱式
消毒温度	90°C~105°C
消毒時間	70分(自動停止)
冷却送風	30分
	} 1サイクル 100分
消毒維持方法	乾燥完了後冷却送風時間帯に UV(紫外線殺菌灯)照射
材質	1) 本体外装 SUS304 1.2mm HL仕上げ 2) 本体内装 SUS304 1.2mm 3) 扉 SUS304 1.2mm HL仕上げ 4) 扉パッキン シリコンスポンジゴム 5) 棚 SUS304(自在式) 6) 断熱材 高性能断熱材使用
制御	昇温過昇防止装置付
電源	3相200V 50/60Hz 消費電力:約5.8Kw



※製品改良にともない予告なく仕様、外觀などを変更になる場合がありますので、ご了承ください。



Nihon Carving Co.,Ltd.

日本カービング株式会社

〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-2 阿部ビル101

Tel.03-6909-8196 Fax.03-6909-8296

E-mail : info@carving-jp.com

<http://www.carving-jp.com>